

ORGANIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA

Menos descarte. Mais clareza para organizar.

Sela Broca e SelaMix são estojos reutilizáveis de silicone para organizar instrumentos compatíveis de forma individualizada durante o processamento profissional.



Dois formatos. Uma lógica de organização.

Sela Broca: 4 cavidades para brocas odontológicas compatíveis, até 26 x 6 mm por cavidade.

SelaMix: 2 cavidades para instrumentos compatíveis de maior comprimento, até 50 x 8 mm por cavidade.

COMECE COM SEGURANÇA

Confira antes de montar.

A compatibilidade do instrumento, a integridade do estojo e a limpeza adequada fazem parte do processamento.

**SELA BROCA**

Para brocas odontológicas compatíveis. Não utilizar para limas ou instrumentos que ultrapassem as dimensões indicadas.

SELAMIX

Para instrumentos compatíveis de maior comprimento, inclusive limas e instrumentos usados em Podologia e Nail Design, quando couberem sem forçar o silicone.

01**Inspecione o estojo**

Não use se houver rasgos, deformação permanente, resíduos ou perda de integridade.

02**Higienize antes do primeiro uso e de cada reutilização**

Lave com água e sabão neutro, enxágue completamente e seque antes de montar.

03**Respeite a capacidade de cada cavidade**

O instrumento deve entrar e sair sem forçar, perfurar ou deformar o estojo.

04**Use apenas itens compatíveis**

Confirme também as orientações do fabricante de cada instrumento e do equipamento de processamento.

PASSO A PASSO

Individualize, sele e organize.

Monte cada cavidade com cuidado para manter a abertura seletiva e a identificação visual.



01

Posicione os instrumentos

Acomode um instrumento em cada espaço, sem sobrepor pontas e sem ultrapassar os limites do estojo.

02

Sele cada cavidade

Use fita indicadora para autoclave com 19 mm, duas camadas e suporte adequado para a fita adesiva.

03

Identifique

Se necessário, marque a fita sem cobrir a área de selagem nem comprometer a abertura seletiva.

Cuidados na vedação

- A fita deve aderir de maneira uniforme e permanecer íntegra.
- Não deixe a cavidade exposta e não una cavidades vizinhas com uma única faixa.
- Não force excessivamente o fechamento: preserve a geometria e a abertura do estojo.
- Mantenha as pontas ativas protegidas e sem contato com a bandeja da autoclave.

Antes de processar, confirme se todas as cavidades estão fechadas e se o conjunto está estável.

FLUXO PROFISSIONAL

Limpar. Secar. Processar. Conferir.

O estojo é reutilizável, mas cada ciclo exige limpeza, inspeção e respeito aos protocolos do serviço.

01

Limpeza

Remova resíduos com água e sabão neutro. Não use abrasivos que possam danificar o silicone.

02

Enxágue e secagem

Enxágue completamente e seque antes de remontar. Umidade residual compromete o preparo.

03

Processamento

Esterilize no ciclo validado pelo serviço, seguindo as instruções da autoclave e dos instrumentos.

04

Retirada segura

Após o ciclo e a secagem, retire pela lateral do estojo. Evite puxar pela fita ou pelas pontas dos instrumentos.

**Antes de liberar para uso**

- ☒ Confirme a secagem completa.
- ☒ Verifique integridade da fita e do estojo.
- ☒ Confira o indicador conforme o protocolo do serviço.
- ☒ Se houver umidade, abertura, rasgo ou falha, reprocesse.

DEPOIS DO CICLO

Integridade vale mais que um prazo fixo.

O conjunto processado deve permanecer seco, protegido e identificado até o momento de uso.



Armazene com critério

Guarde em local limpo, seco e protegido, conforme o POP e a política de validade adotados pelo serviço.

Não adote um número fixo de dias sem a validação do responsável técnico. A liberação depende da integridade da barreira, das condições de armazenamento e do protocolo institucional.

Quando não utilizar

- ! Estojo danificado, deformado ou com resíduos.
- ! Fita aberta, rasgada, úmida, solta ou sem integridade.
- ! Instrumento incompatível ou acomodado sob tensão.
- ! Resultado do ciclo ou indicador em desacordo com o protocolo.

Informação regulatória e fontes oficiais: ledclick.com.br/documentacao-regulatoria

Este manual não substitui POP, validação do ciclo, orientação do responsável técnico nem instruções dos fabricantes dos equipamentos e instrumentos.

DEPOIMENTOS DE QUEM ENSINA E VIVE A ODONTOLOGIA



“ Prof. Dr. Wallace Coimbra

... um produto ecologicamente correto, que vai fazer com que o corte da sua broca dure mais, o corte ativo dela, ele também ajuda a organizar as brocas por áreas ou por dentistas, da sua clínica. Permite várias utilizações portanto indispensável no dia a dia da clínica.

“ Profa. Dra. Roberta Mota

... chega de embalar uma a uma, aquela trabalhadeira que a gente sabe que dá... Usamos na clínica e recomendo a todos os colegas! Praticidade, Biossegurança e Sustentabilidade!



“ Profa. Dra. Giuliana Lopes

... cabem 4 brocas cada e com 4 cores, dá pra você separar por especialidades ou por pacientes, então é tudo de bom, usou uma broquinha, ok, as outras três ficam no jeito para o próximo atendimento, não fica reprocessando tudo de novo outra vez. Economia de tempo, dinheiro e material...

“ Prof. Dr. Paulo Vinícius Soares

... a otimização do processo, hoje os meus funcionários, eles estão trabalhando na esterilização de brocas pontas diamantadas independente do tamanho, eles perdem muito tempo quando vão fazer aquele selamento convencional



“ Profa. Dra. Camila Freitas

... eu acho que fica mais organizado e eu tiro só uma broca por vez, então não contamina o broqueiro inteiro e olha que legal,! É um material de silicone, e aqui a gente coloca um pedacinho de fita de esterilização... evita de usar aquele pacote de esterilização.



REUTILIZÁVEL, O ESTOJO DE SILICONE **OTIMIZA** O TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO, DIMINUI O GASTO DE ENERGIA COM A SELADORA, DIMINUI OS RESÍDUOS DE PAPEL E PLÁSTICO, **ORGANIZA** E MANTÉM ESTERILIZADO OS ARTIGOS CRÍTICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA.